

Metoda czyszczenia


Przenośny inhalator membranowy

MODEL: TM-NEB MICRO MESH



PRZYGOTOWANIE INHALATORA DO PRACY

- 1 W przypadku doboru leku do inhalacji, dawki i czasu trwania leczenia, zawsze stosuj się do zaleceń lekarza.
- 2 Nie używaj wody destylowanej, filtrowanej i substancji olejowych.
- 3 Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- 4 Inhalator, zbiornik na lek i pozostałe akcesoria utrzymuj suche po każdym użyciu i czyszczeniu.
- 5 Nie dotykaj membrany palcem, patyczkiem bawełnianym ani ostrymi i twardymi przedmiotami, by jej nie uszkodzić.
- 6 Ładuj urządzenie przez co najmniej 30 min. przed pierwszym użyciem.

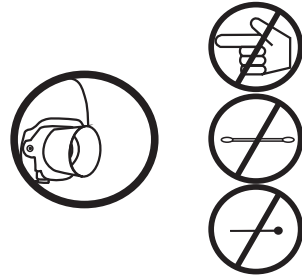

Otwórz pokrywę zbiornika na lek



Wlej odpowiednią ilość leku nie przekraczając maksymalnej granicy (skala oznaczona z boku zbiornika)



Zamknij pokrywę zbiornika




Założ maskę na wylot zbiornika



Inhalator przygotowany jest do pracy. Możesz rozpocząć inhalację naciskając przycisk włączający.

- Przytrzymaj przez 3 sekundy by zmienić tryb inhalacji
- Zwiększanie natężenia nebulizacji
- Zmniejszanie natężenia nebulizacji

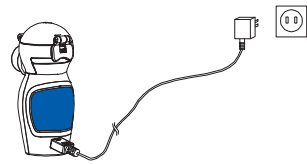

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

- Uwaga!** Przed przystąpieniem do ładowania, należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest prawidłowe, a żaden z elementów zasilania nie jest uszkodzony.
- Uwaga!** Inhalator należy ładować tylko za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu.
- Uwaga!** Gdy w zbiorniku na lek jest wystarczająca ilość płynu, a mimo tego wskaźnik miga na pomarańczowo, naciśnij przycisk by przejść w tryb pracy.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Czyszczenie wstępne



Zdejmij maskę lub ustnik z wylotu zbiornika na lek



Otwórz zbiornik i usuń pozostałości po leku



Nalej do zbiornika ciepłą wodę (max. 40°C). Nie używaj wody destylowanej i wielokrotnie filtrowanej



Zamknij pokrywę zbiornika



Włącz urządzenie naciskając przycisk WŁ/WYŁ . Rozpocznie się proces inhalacji z wodą w celu oczyszczenia zbiornika i membrany z pozostałości po leku. Po 2 minutach włącz urządzenie tym samym przyciskiem, lub wyłącz się ono automatycznie po 10 min.

2. Pełne czyszczenie



Zdejmij zbiornik na lek z jednostki głównej zsuwając go po szynach. Przetrzyj urządzenie wilgotną szmatką i osusz.



Wyczyść wewnątrz zbiornika



Wyczyść wylot zbiornika zewnątrz i wewnątrz

Powtórz kilkakrotnie powyższe czynności używając czystej wody o temperaturze nie większej niż 40°C. Osusz dokładnie wszystkie elementy delikatną szmatką lub gazą nie dotykając membrany i odstaw je w suche miejsce aż do następnego użycia

Nebulizacja z kroplą czystej wody i 3 kroplami białego octu winnego może dać lepsze efekty czyszczenia